

## Equipo: VISULAS 532 y 532s

Descripción del Mantenimiento Preventivo a realizar en cada visita.

### **Limpieza Revisión y Calibración en la Consola Láser.**

- Revisión de la Potencia del Rayo Láser Terapéutico en: 50mW, 1W y 1.2W.
- Revisión del Rayo Guía (Aiming Beam) < 0.95mW.
- Revisión de Potencias en Modo Endo y LIO ( sí se cuenta con esta opción ).
- Alineación de el Resonador Láser.
- Alineación de la Fibra Óptica con el Resonador Láser.
- Calibración y Alineación de el Láser Guía.
- Medición del Factor de Transmisión.
- Asegurarse de que estén alineados el Rayo Guía con el Rayo Terapéutico.

### **Limpieza y Revisión en la Lámpara de Hendidura (LASER SLIT LAMP, LSL).**

- Limpieza de Oculares.
- Limpiar y Revisar el movimiento de los brazos del Tubo Binocular.
- Limpiar y Revisar los selectores de Filtros, Hendidura y Magnificaciones.
- Limpiar y Revisar Frenos y Sistemas de Movimiento de LSL.
- Limpiar Prisma Láser.
- Revisión y Ajuste de Motores Controlados por el Micromanipulador.

VISULAS 532 y 532s



## **Lista de Accesorios no incluidos en ningun tipo de contrato**

Cámaras de video, Sony, Panasonic, etc.

Monitores de video, Sony, Panasonic, etc.

Impresoras: Laser y de Inyección de Tinta, HP, Cannon, etc.

Video Impresoras

Cámaras Fotográficas: Cannon, Pextax, etc.

## **Si desea mas información favor de contactarnos:**

Contacto	Teléfono	e-mail
Lic. Gabirela Valenzuela	( 01-55 ) 59 99 02 37	<a href="mailto:g.valenzuela@zeiss.org">g.valenzuela@zeiss.org</a>
Lic. Gabriela Gutierrea	(01-55 ) 59 99 02 37	<a href="mailto:g.gutierrez@zeiss.org">g.gutierrez@zeiss.org</a>
Ing. Joel Zaldívar	( 01-55 ) 59 99 03 40	<a href="mailto:zaldivar@zeiss.org">zaldivar@zeiss.org</a>